



In beiden Scherenhälften befindet sich innen eine Identnummer (gleich für beide Seiten) so daß die jeweilig passenden Teile wieder montiert werden können.

Both scissors parts are marked inside with a identification number (equal for both sides), so that the matching parts can be assembled each time again.



Unsere Arbeitsanweisung Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Instrumenten nach DIN EN ISO 17664 QSA313 finden Sie unter www.carlmartin.de

Our work instruction for the reprocessing of re-sterilisable instruments according to DIN EN ISO 17664 (QSA313) you can find on www.carlmartin.de



NEUENKAMPER STR. 80-86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY

TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45

B-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

QSF1042 Rev. A - 12.03.2019 B-0018-19-Gebrauchsanweisung Scheren Easy Clean - 2019

carl
marlin



CE

FINEST DENTAL INSTRUMENTS



EASY
Clean


GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE



REF 802/12-EC / 864/13-EC

Zahnfleischscheren · Gum scissors

GEBRAUCHSANWEISUNG

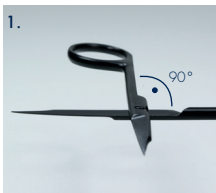

1. Zur Demontage öffnen sie die Schere im Rechten Winkel - 90°




2. Heben sie den oberen Teil der Schere kurz an (ca. 45°) und lösen die beiden Scherenteile voneinander - FERTIG
(bei sachgemäßer Handhabung lassen sich die Scherenteile ohne großen Kraftaufwand korrekt lösen - ansonsten besteht die Gefahr einer Beschädigung / Bruch der Schraube)



3. Nach erfolgter Aufbereitung werden die beiden Scherenteile dann in umgekehrter Reihenfolge (entsprechend der Bilder 1 -2 -3) wieder zusammen gesetzt

INSTRUCTIONS FOR USE

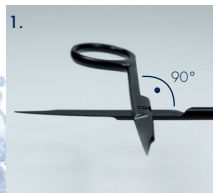

1. For dismantling, open the scissors in the right angle - 90°



2. Lift the upper part of the scissors briefly (ca. 45°) and separate both parts from each other - DONE
(By appropriated handling, the scissors parts can be separated without great effort - otherwise risks of damages/break of the screw are not excluded.)



3. After processing has been effected, both scissors parts are put together again in reversed order (according to the pictures 1-2-3).